



1

Meting voorbereiden

- Keer de SentiSock binnenstebuiten.
- Smeer een dun laagje HUME-gel op de 2 zwarte vierkantjes **(afb. 1)**.
- Keer de SentiSock weer goed.
- Trek de SentiSock aan de juiste voet aan; links **(L)** of rechts **(R)**.
- Onthoud het ID-nummer van de Senti-module **(afb. 2)** voor stap 2.
- Maak de Senti-module met de band vast om het been zodat hij niet afzakt.
- Steek het kabeltje van de SentiSock in de Senti-module.

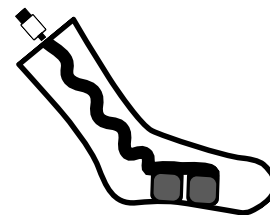

Afb. 1 SentiSock

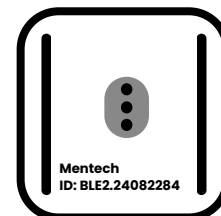


Afb. 2 Senti-module

2

Meting starten

- Controleer of het LED-lampje op de Senti-module **blauw** knippert.
- Open de HUME-app op de HUME-telefoon en log in.
- Druk op 'start' bij de naam van de cliënt.
- Selecteer de Senti-module met het ID-nummer uit stap 1 en druk op start. Het LED-lampje knippert **groen** en is verbonden.
- De HUME-telefoon moet tijdens de meting dicht bij de cliënt blijven, bijvoorbeeld in het heuptasje.

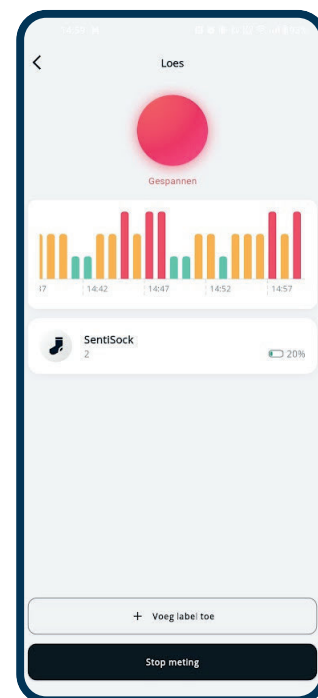

Afb. 3 HUME-telefoon
(HUME-logo op achterkant)

3

Meting volgen

- Open de HUME-app op een andere telefoon (bv. groepstelefoon) of tablet en log in.
- Klik op de naam van de cliënt om het real-time spanningsniveau en de spanning van afgelopen uur te bekijken **(afb. 3)**.

4

Meting stoppen

- Open de HUME-app op de HUME-telefoon.
- Druk op 'stop meting'.
- Haal de Senti-module los van de sok.
- Trek de SentiSock uit en stop deze in de bijgeleverde HUME-waszak.
- Laad de Senti-module en de HUME-telefoon op **(afb. 4)**.
- Je hebt de meting nu succesvol afgerond.



Afb. 4 Status LED-lampje

Rood = laadt op
Groen = opgeladen