


Epicare (matras) Snel van start

1

Sensor aan het matras bevestigen

- Bevestig de bewegingssensor zó aan het matras dat deze goed meebeweegt met de bewegingen van het matras.
- Plaats de sensor dicht bij het punt waar bewegingen optreden tijdens een toeval.
- Zorg dat de sensor op een plek zit waar hij niet weggeduwd kan worden tijdens een toeval.
- De sensor kan aan de zijkant of onderkant van het matras worden bevestigd.
- Gebruik veiligheidsspelden en tape om de sensor stevig vast te maken, onder het hoeslaken.

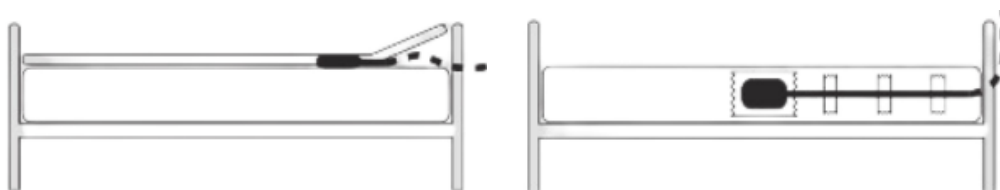

2

Epicare instellen

Overleg indien nodig met de neuroloog/arts VG hoe de epicare ingesteld moet worden

Gevoeligheid

1. Ga met het pijltje naar beneden (1) in het menu naar 'beweging sens'.
2. Druk op OK (2).
3. Kies het gewenste niveau met de pijltjes (1-3):
 - 1 = minst gevoelig
 - 10 = meest gevoelig
4. Druk op OK (2) om de instellingen op te slaan.

Tijd

1. Ga met het pijltje naar beneden (1) in het menu naar 'gevoeligheid'.
2. Druk op OK (2).
3. Stel met de pijltjes (1-3) het aantal seconden in voordat de Epicare een melding geeft.
4. Stel deze niet te laag in om te voorkomen dat er meldingen binnenkomen wanneer een cliënt zich omdraait in bed.
5. Druk op OK (2) om de instellingen op te slaan.



Er komen geen meldingen meer binnen

- De Epicare kan maximaal 99 meldingen opslaan.
- Zijn deze vol? Dan moeten ze handmatig gewist worden om nieuwe meldingen te kunnen ontvangen.

Meldingen wissen

1. Ga met het pijltje omlaag (1) in het menu naar 'Wis meldingen'.
2. Druk op OK (2).
3. Ga met het pijltje omlaag (1) naar 'JA'.
4. Druk op OK (2).

Tip: Zet een maandelijkse herinnering in de agenda om de Epicare te controleren op het aantal meldingen en deze indien nodig te legen.

Storing

Gaat de Epicare regelmatig in storing of komen er geen meldingen binnen na het legen? Maak dan een melding in Ultimo met een duidelijke omschrijving van de storing.

Batterij leeg

Krijg je de melding "Batterij bijna leeg"? Maak een melding in Ultimo voor de huismeester. Na deze melding werkt de batterij nog ongeveer 2-3 maanden.

