


1

Plaats de uitbedmelder

Plaats de uitbedmelder onder het matras van de cliënt, op heuphoogte.

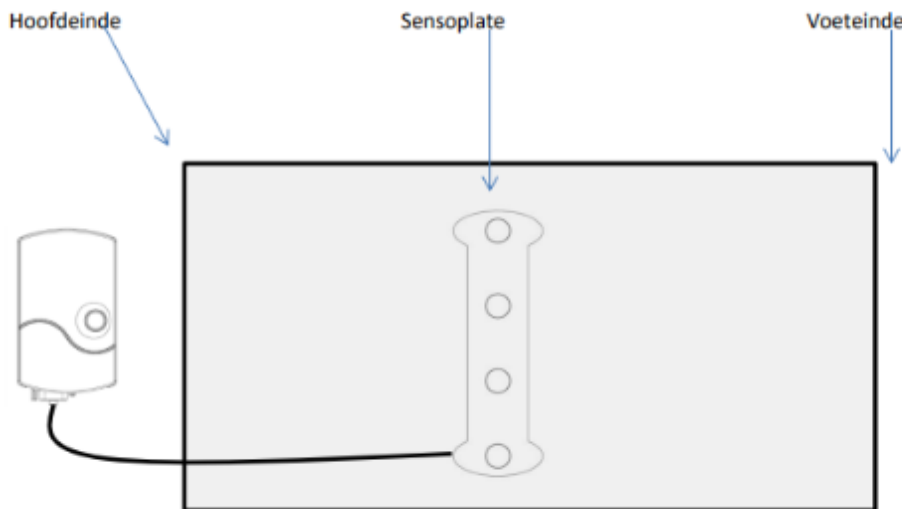


Wordt de uitbedmelder gebruikt om een melding te krijgen wanneer de cliënt gaat zitten? Plaats de uitbedmelder dan op schouderhoogte.

2

Instellen op het gewicht van de cliënt

Deze stap voer je uit nadat de uitbedmelder correct is geplaatst in het bed (zie stap 1).

1. Laat de cliënt in bed gaan liggen.
2. Steek de stekker van de uitbedmelder in het stopcontact.
3. De uitbedmelder stelt zichzelf automatisch in op het gewicht van de cliënt.
4. Het groene lampje op het kastje:
Brandt continu → wanneer de cliënt ligt in bed.
Knippert → wanneer de cliënt niet in bed ligt.

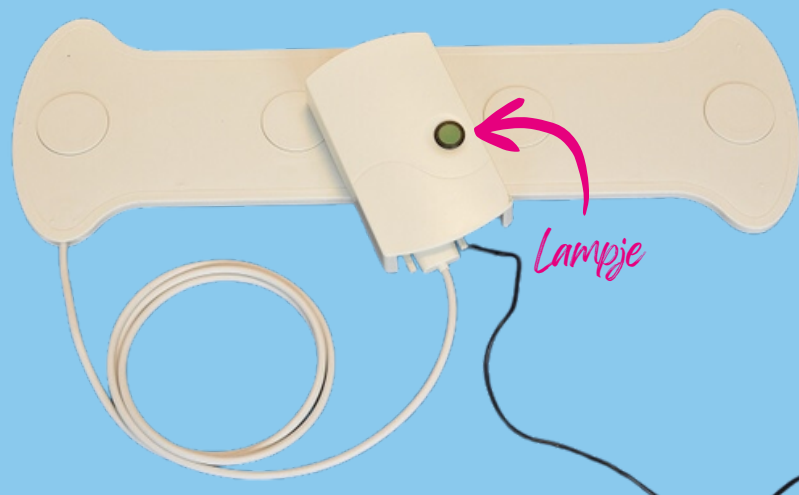

Er komen geen meldingen meer binnen

Wanneer er geen meldingen meer binnenkomen van de uitbedmelder, doorloop dan de volgende stappen om de uitbedmelder te resetten:

1. Controleer of de uitbedmelder correct in het bed ligt (zie plaatsingsinstructie).
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Laat de cliënt in bed gaan liggen.
4. Steek de stekker opnieuw in het stopcontact.
5. De uitbedmelder stelt zichzelf automatisch in op het gewicht van de cliënt.

Veelvoorkomende oorzaken van storingen zijn:

- De uitbedmelder ligt niet goed meer in bed (bijvoorbeeld na het verschonen van het bed).
- De uitbedmelder heeft tijdelijk geen stroom gehad.

Ultimo

Komen er na het resetten nog steeds geen meldingen binnen? Maak dan een melding in Ultimo. Geef altijd een duidelijke omschrijving van de storing, inclusief wat je al hebt geprobeerd (zoals resetten of controleren van de plaatsing).

Batterij leeg

Ontvang je de melding 'Batterij bijna leeg'? Maak dan een melding in Ultimo voor de huismeester. Na deze melding werkt de batterij nog ongeveer 2 tot 3 maanden.

